


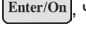

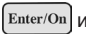
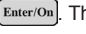






Cuvette Calibration



For use only with **AVOXimeter® 4000**
Total Hemoglobin Concentration (tHb)

EN	TR	RU
<p>Accuracy of total hemoglobin measurements depends on using the correct cuvette calibration code. The user must check the cuvette calibration code whenever using a different lot number of cuvettes.</p>	<p>Total hemoglobin ölçümlerinin doğruluğu, doğru küvet kalibrasyon kodunun kullanılmasına bağlıdır. Kullanıcı, farklı lot numaralarından küvetler kullandığında küvet kalibrasyon kodunu kontrol etmelidir.</p>	<p>Точность определения уровня общего гемоглобина зависит от правильности калибровочного кода кюветы. Пользователь должен проверять этот показатель при начале работы с каждой новой партией кювет.</p>
<p>1</p> <p>1. Calibration 2. Printer Mode 3. Stored Data 4. Turn Off</p>	<p>1. Display the “Calibration” menu (a submenu of )</p>	<p>1. Выведите на экран меню “Калибровка” (подпункт меню )</p>
<p>2</p> <p>1. Cuvette Cal Code 2. Cuvette Lot Number 3. Hüfner’s# 1.30-1.39</p>	<p>2. Press 1 followed by  to display the cuvette calibration code screen.</p>	<p>2. Нажмите 1, а затем , чтобы вывести экран для введения показателя калибровочного кода кюветы.</p>
<p>3</p> <p>Cuvette Cal Code: *****41878*****</p> <p>1. OK 2. Enter New Value</p>	<p>3. Press 2 followed by  to enter a new value. A screen for entering a new cuvette calibration code is displayed.</p>	<p>3. Нажмите 2, а затем  и введите новое значение. Отобразится экран для введения нового показателя калибровочного кода кюветы.</p>
<p>4</p> <p>Cuvette Cal Code: ***** ***** (Up to 5 digits; no leading zeros)</p>	<p>4. Check that the new pathlength is correctly displayed, then press . The “Calibration” menu is again displayed.</p>	<p>4. Удостоверьтесь, что новая длина оптического пути кюветы показана правильно, затем нажмите . На экране снова отобразится меню “Калибровка”.</p>
<p> Caution: Cuvettes must be kept dry at all times. Before analyzing samples, take from the re-sealable poly bag only as many cuvettes as needed for immediate use. Promptly re-seal the poly bag containing the cuvettes and desiccant.</p>	<p> Dikkat: Küvetler her zaman kuru tutulmalıdır. Numuneleri analiz etmeden önce, yeniden kapatılabilir polietilen torbadan yalnızca hemen kullanım için gereken sayıda küvet alın. Küvetleri ve nem gidericiyi içeren polietilen torbayı hemen tekrar kapatın.</p>	<p> Соблюдайте осторожность: кюветы должны все время оставаться сухими. Перед проведением анализа образца возьмите из герметизируемого пакета число кювет, которое Вы будете использовать незамедлительно. После этого повторно запечатайте пакет, содержащий кюветы и влагопоглотитель.</p>

Accriva
diagnostics

Accriva Diagnostics, Inc.
6260 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA
Tel: 858.263.2300 • Fax: 858.314.6700
www.accriva.com

EC REP MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany 